

# Vejledning til Unitron uTV™ 2



**unitron.** Hearing matters

## Tak

---

Tak, fordi du har valgt en Unitron uTV™ 2.

Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede, formålsdrevne løsninger til alle.

Because hearing matters.

## Din uTV 2

---

Høreapparattpasser: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_


Serienummer of uTV 2: \_\_\_\_\_

Garanti: \_\_\_\_\_


Købsdato: \_\_\_\_\_

## Pakkeindhold

Det komplette Unitron uTV 2-system består af følgende elementer:

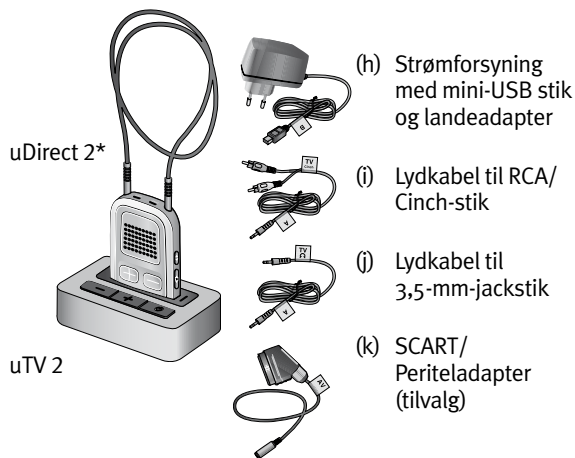

\*uDirect™ 2 sælges separat.


 **Notat:** se venligst din uDirect 2 guide for den komplette information på uDirect 2 tilbehøret.

## Indholdsfortegnelse

uTV 2 beskrivelse .....	2
Introduktion .....	4
Trin 1: Installation af strømforsyningen .....	4
Trin 2: Tilslutning af uTV 2 .....	5
Trin 3: Alle enheder skal være tændt .....	10
Trin 4: Sammenkobling af uDirect 2 og uTV 2 .....	12
Daglig brug af uTV 2 .....	14
Trin 5: Brug af din uDirect 2 .....	14
Trin 6: At lytte til dit TV .....	15
Trin 7: Indstilling af TV-signalets lydstyrke .....	16
Trin 8: Pauser og telefonopkald under brug .....	18
Trin 9: Sluk uTV 2 og uDirect 2 .....	20
Trin 10: Opladning af uDirect 2 .....	22
Test af lydtransmissionen .....	25
Fejlfindingsvejledning .....	27
Vigtige oplysninger .....	30
Information om overensstemmelse .....	33

## uTV 2 beskrivelse

Unitron uTV 2 forbinder dine høreapparater trådløst til dit TV eller andre audioenheder. Systemet består af tre hovedelementer: Dine høreapparater, uDirect 2 og uTV 2.

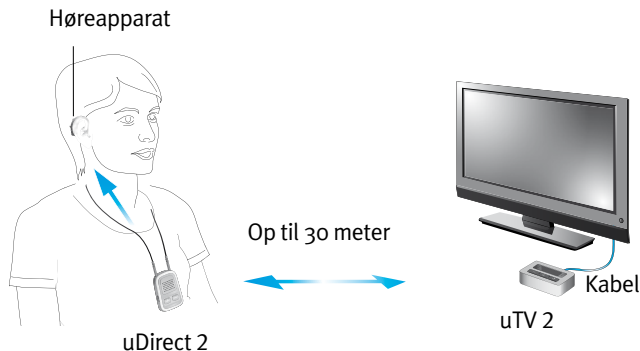


uTV 2 sluttet til dit TV (eller anden lydkilde) og sender trådløst lydsignaler fra dit TV til uDirect 2 inden for en afstand på op til 30 meter. uTV 2 fungerer også som ladestation for uDirect 2, når uDirect 2 ikke er i brug.

### Knapper

- (a) TIL/FRA-knap
- (b) TV-signal volumen (op)
- (c) TV-signal volumen (ned)

### Indgange


- (d) Strømindgang (mini-USB)
  - (e) Lydingang (3,5 mm jackstik)
  - (f) Ladestik til uDirect 2
- (g) Statusindikator

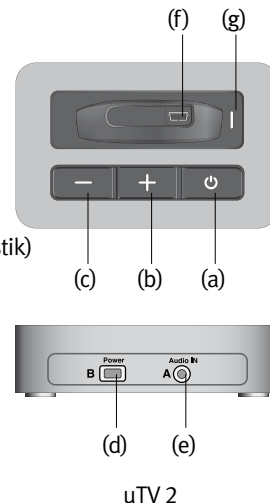


# Introduktion

## Trin 1: Installation af strømforstyringen


1. Vælg den adapter, der passer til dit land.

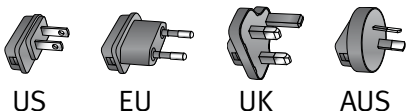

2. Sæt det runde hjørne af adapteren ind i det runde hjørne af universalstrømforstyringen, indtil det er sat helt ind.

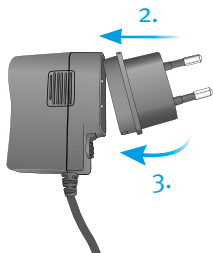

3. Klik enden af adapteren i for at låse den på plads. Sørg for, at adapteren sidder godt låst fast.

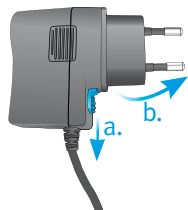

## For at tage strømadapteren fra:

- a. Træk tappen på universalstrømforstyringen tilbage og hold fast.

- b. Træk forsigtigt adapteren opad for at tage den ud af stikkontakten.


- c. Start så forfra med trin 1 (se ovenfor).

## Trin 2: Tilslutning af uTV 2

### Sådan tilsluttes strømforstyringen:


Placer uTV 2 ved siden af dit TV.

Tilslut strømforstyringens mini-USB-stik (d) til strømindgangen (Power) på uTV 2. Sæt strømforstyringen i strømstikket (h).

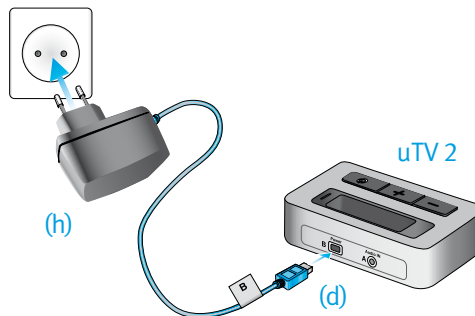

Brug RCA/Cinch-kablet (i) til at slutte uTV 2 på TV'et:


Tilslut stereostikket (e) til lydindgangen (Audio IN) på uTV 2. Tilslut de røde og hvide stik (i) til de tilsvarende røde og hvide stik til udgangss lyd på dit TV.

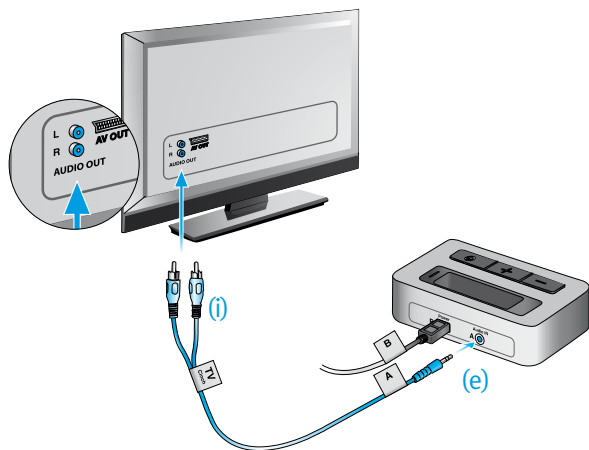



Du kan også tilslutte uTV 2 til headsetstikket på dit TV ved hjælp af audiokablet:


Tilslut stereostikket (e) til lydindgangen på uTV 2 (Audio IN).

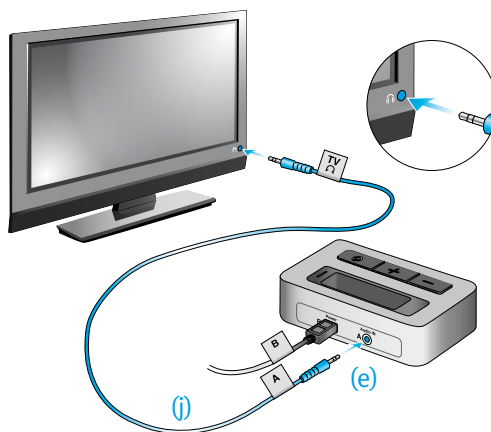Sæt den anden ende i headsetstikket til udgangss lyd på dit TV.




 Når du slutter uTV 2 til headsetstikket på dit TV, kan du justere lydstyrken ved hjælp af TV-fjernbetjeningen.

 På nogle TV-apparater slår højttalerne fra, når jackstikket sættes i headsetstikket – TV'et vil ikke være hørbart for andre personer. I dette tilfælde skal du bruge Cinch/RCA- eller SCART-stikket til udgangsslyd som beskrevet ovenfor. Du kan finde flere oplysninger om indstilling af lydstyrken i trin 7 nedenfor. uTV 2 kan også sluttes til enhver anden lydkilde som f.eks. en MP3-afspiller, en computer eller et lydsystem i hjemmet via stereostikkablet (j).

 Nogle TV'er har ikke et analog output med RCA kabel. I så fald kan uTV 2 tilknyttes det analoge output RCA kabel via TVboksen eller stereoanlæg med denne outputforbindelse i stedet.

### Alternativt kan du bruge en SCART-adapter:

Sæt den ene ende af lyd-kablet (j) i uTV 2 og den anden ende til SCART-adapteren. Sæt derefter SCART-adapteren (k) i et ledigt SCART-stik til udgangsslyd på TV'et.

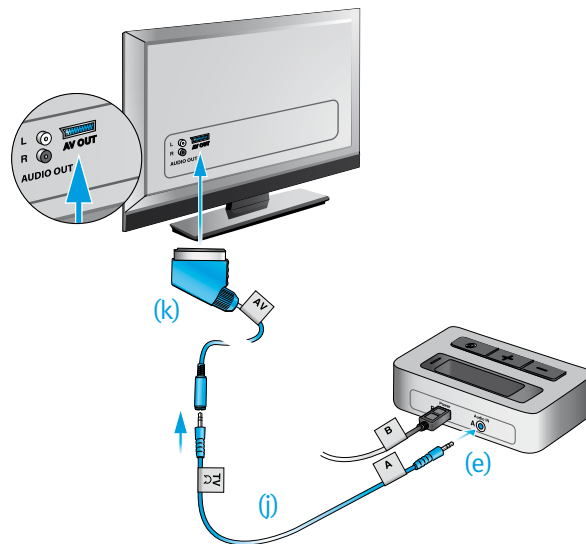

### Trin 3: Alle enheder skal være tændt

For at kunne bruge uTV 2-systemet skal alle enheder være tændt.

Tænd for dit TV eller anden lydkilde.

Sørg for, at dine høreapparater er tændt og sidder korrekt.

For at tænde din uDirect 2 skubber du strømafbryderen hen til positionen Tændt (ON) som vist i fig. 1.

uDirect 2


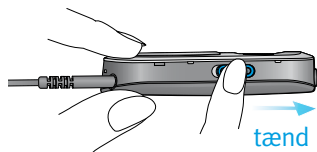


Fig. 1

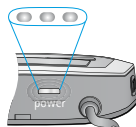

Tænd uTV 2 med et kort tryk på TIL/FRA-knappen (a) som vist i figur 2. Statusindikatoren (g) lyser først grønt og kan skifte til at lyse blå senere.

uTV 2

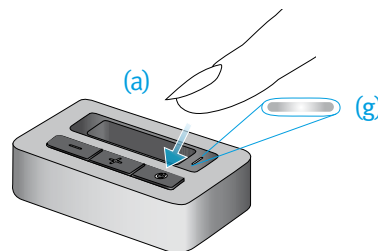




Fig. 2



-  Hvis strømindikatoren på uDirect 2 blinker rødt eller slet ikke lyser, kan uDirect 2s batteriniveau være lavt. Hvis dette er tilfældet, skal du først oplade uDirect 2 som beskrevet i trin 10.
-  Du kan finde en mere detaljeret forklaring på uDirect 2-indikatorerne i betjeningsvejledningen til uDirect 2.





#### Trin 4: Sammenkobling af uDirect 2 og uTV 2

Før du begynder at bruge uTV 2-systemet, er det nødvendigt at sammenkoble uDirect 2 og uTV 2. Sammenkoblingsproceduren er nødvendig for at kunne styre, hvilke Bluetooth-enheder der må kommunikere med hinanden.

Sørg for, at begge enheder er tændt, som beskrevet i trin 3 ovenfor.

-  Du behøver ikke at sætte uDirect 2 i uTV 2 ladestik (f) under sammenkoblingen.
-  Sammenkoblingen skal kun udføres én gang for hver enhed, du ønsker at bruge sammen med uDirect 2.

1. Tryk og hold uDirect 2  og  knap samtidigt i 2 sekunder, indtil lydindikatoren begynder at vise et hurtigt blinkende blått lys (fig. 3). Din uDirect 2 vil forblive i



sammenkoblingstilstanden i to minutter, eller indtil sammenkoblingen er fuldført.

2. Hvis uTV 2 statusindikator (g) ikke allerede viser et hurtigt blinkende blått lys, skal du trykke på TIL/FRA-knappen (a) i 5 sekunder, indtil Bluetooth-indikatoren (g) viser et hurtigt blinkende blått lys som vist i fig 4.

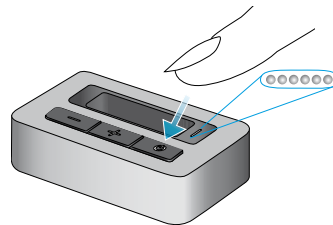


Fig. 4

3. Vent indtil begge Bluetooth-indikatorer, (g) lyser blått konstant. Dette kan tage op til 2 minutter men sker typisk i løbet af få sekunder.


## Daglig brug af uTV 2

Du skal først tænde begge enheder som beskrevet i trin 3.

### Trin 5: Brug af din uDirect 2

Før der kan foretages telefon-, musik- eller TV-streamning, skal uDirect 2 tændes og bæres korrekt som vist nedenfor:

1. Tag halsslyngen på rundt om din hals (gøres nemt ved at tage et halsslyngestik ud).
2. Sørg for, at begge stik er sat godt på plads i halsslyngens indgange.
3. Tænd for uDirect 2-enheden.

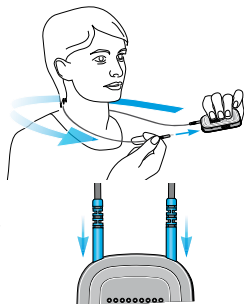


 Når du har tændt uDirect 2, genkender den automatisk dine trådløse Unitron-høreapparater.

 I tilfælde af interferens med andre høreapparater bedes du kontakte din høreapparatspecialist.


### Trin 6: At lytte til dit TV

Du vil kunne høre lyden fra TV'et direkte i dine høreapparater.

 Hvis du ikke kan høre lyden fra dit TV gennem uTV 2, skal du gentage trin 1-5.

uTV 2-systemet understøtter brug af Bluetooth inden for en afstand på op til 30 m. Det er ikke nødvendigt, at der er frit udsyn mellem din uDirect 2 og uTV 2. Dog kan interferens i omgivelserne i form af vægge eller møbler reducere funktions-rækkevidden.

Hvis uDirect 2 fjernes fra uTV 2 rækkevidde, afbrydes den trådløse audiotransmission. Hvis uDirect 2 derefter flyttes tilbage inden for uTV 2 rækkevidde, vil den automatisk genoptage streamning til dine høreapparater.

 Det kan tage op til 10 sekunder, før streamningen genoptages. Begge streamningsindikatorer (g) skal lyse blåt konstant under streamning.

 Hvis uTV 2 statusindikator (g):

blinker grønt, skal du sørge for, at lydindgangen til uTV 2 er ordentligt tilsluttet, og at indgangslydens volumen er sat til et niveau på 75%.

er grøn, så sørg for, at uDirect 2 er tændt, begge ender af halsslyngen er sat i, og enhederne er sammenkoblet.

blinker blåt, er du i pausetilstand. Tryk på uDirect 2 (A) hovedknap for at genoptage streaming.


## Trin 7: Indstilling af TV-signalets lydstyrke

Du skal først indstille TV'ets højttalere til en lydstyrke, der passer andre TV-kiggere.

Hvis uTV 2 er koblet til dit TV med RCA/Cinch-kablet (i) eller SCART-adapteren (k), skal du justere lydstyrken via uTV 2 knap til indstilling af lydstyrke (b) og (c) (fig. 5) indtil lydstyrken er behagelig.

Til daglig brug og finjustering af lyden skal du bruge Volumenknapperne (+/−) (fig. 6) på uDirect 2.

Hvis din uTV 2 er sluttet til hovedtelefonstikket på dit TV, kan du bruge TV-fjernbetjeningen til at indstille lydstyrken direkte via TV'et. Se betjeningsvejledningen til TV'et, hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du indstiller TV'ets lydstyrke.

 Hvis dit TV er koblet til en satellitmodtager eller en set-topboks, skal du kontrollere, at lydstyrken på dette ekstraudstyr er indstillet til et 75 %-niveau, for at få den bedste lyd kvalitet.


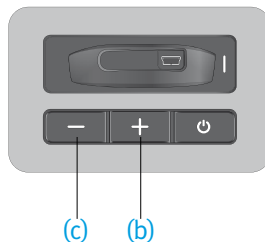


Fig. 5



Fig. 6

## Trin 8: Pauser og telefonopkald under brug

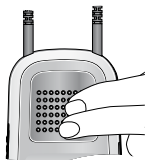

Hvis du ønsker en pause i lydtransmissionen fra TV'et, skal du trykke på uDirect 2 hovedknop (A).

### Under en pause:


Bluetooth-indikatorerne blinker blå på begge enheder.

Dine høreapparater skifter tilbage til det lytteprogram, du sidst har brugt.

For at genoptage TV-lytningen skal du trykke på uDirect 2 hovedknop (A) igen. Se uDirect 2 betjeningsvejledningen, hvis du ønsker at styre flere indgangskilder.


Hvis uDirect 2 er koblet sammen med din mobiltelefon, kan du stadig modtage opkald, selv når du ser TV via uTV 2. Hvis du får et

indkommende opkald, vil uDirect 2 automatisk stoppe med at sende lydsignalet fra dit TV og sender i stedet signalet fra din mobiltelefon til dine høreapparater.

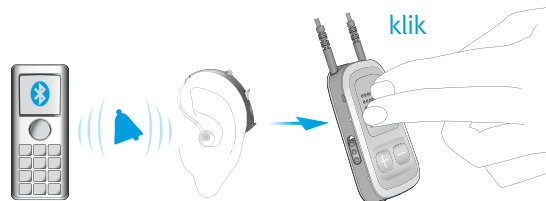

For at tage imod et indkommende opkald skal du trykke kort på uDirect 2 hovedknop (A), når du hører ringetonen i dine høreapparater. Tryk på hovedknappen igen, og telefonsamtalen afsluttes.

For at afvise et opkald skal du trykke på og holde uDirect 2 hovedknappen (A) inde i 2 sekunder under ringetonen.

 Se uDirect 2-betjeningsvejledningen for at få oplysninger om, hvordan uDirect 2 sammenkobles med mobiltelefonen eller andre underholdnings og kommunikationsenheder som f.eks. radioer eller computere.

## Trin 9: Sluk uTV 2 og uDirect 2

### Sådan slår du enhederne fra:

For at afslutte transmissionen af TV'ets lydsignal skal du slå uTV 2 fra ved at trykke på TIL/FRA-knappen (a) som vist i figur 7.

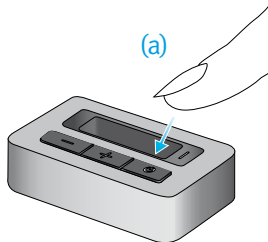


Fig. 7

Hvis uDirect 2 ikke bruges til andre formål såsom telefonopkald, slås den fra ved at skubbe strømafbryderen til positionen FRA som vist i fig. 8. uDirect 2 strømindikator blinker først rødt, og derefter lyser den i 2 sekunder for at vise den fuldstændige nedlukning.

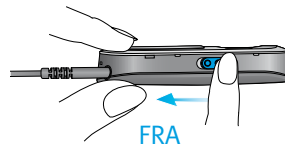



Fig. 8

 Hvis der ikke er nogen lydindgang, stopper uTV 2 automatisk Bluetooth-audio transmissionen til uDirect 2 efter 5 minutter. Statusindikatoren blinker grønt.

## Trin 10: Opladning af uDirect 2

For at oplade uDirect 2 skal du forsigtigt sætte den i ladesticket (f) på uTV 2 som vist i figur 9.

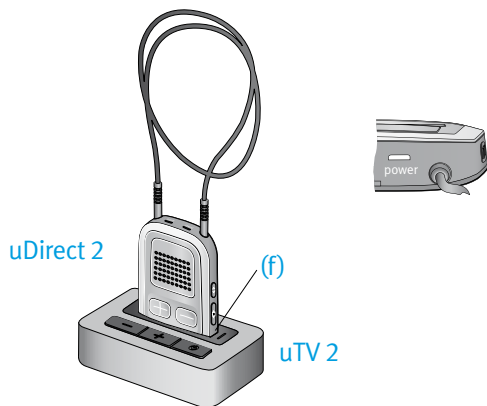


Fig. 9

### uDirect 2 strømindikator


Oplader - Konstant rød


Opladet og fuldt batteri - Konstant grøn

uTV 2 kan enten være slået TIL eller FRA under opladning. Dens statusindikator (g) indikerer ikke opladningsprocessen.







Den typiske tid til fuld opladning af uDirect 2 er 90 minutter.

Vi anbefaler, at uDirect 2 er slukket under opladning.

 Når du oplader uDirect 2 første gang, skal du oplade den i mindst tre timer, også selv om batteriindikatoren begynder at lyse grøn, før de tre timer er gået. Efter den første opladning kan du lade uDirect 2 blive i uDirect 2 ladestik i ubegrænset tid.

 Af hensyn til sikkerheden må batteriet kun oplades ved hjælp af ladere fra Unitron. Hvis andre opladere bruges, skal de være USBcertificerede (5,0 VDC / 500 mA).

## At forstå statusindikatorerne til uDirect 2 og uTV 2 under streaming

	 uDirect 2	 uTV 2
Streaming	Konstant blå 	Konstant blå 
Streaming pause*	Korte blink 	Blink 
uTV 2 ikke forbundet*	Mørk	Grøn

\*Hvis uDirect 2 også er forbundet til en telefon, vil dens lydindikator:



- Dobbelt-blinke under streamingpausen
- Blinke, hvis uTV 2 ikke er forbundet


## Test af lydtransmissionen

uTV 2 kan generere en testlyd for at tjekke systemet.

### Sådan påbegyndes testen:

Tænd og brug uDirect 2 korrekt.

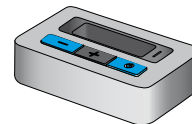

Sluk uTV 2 først, tryk så på uTV 2 volumen- og tænd/sluk- knapper samtidigt, indtil statusindikatoren



begynder at blinke i forskellige farver.

uDirect 2 og uTV 2 bør være tilsluttet nu (blå/grønne eller blå/orange blink), og du hører en lydprøvemelodi i dine høreapparater.

Testlyden fortsætter i 2 minutter, eller indtil der bliver trykket på en af uTV 2 knapper.

Brug uDirect 2 volumenknapperne   for at skrue op eller ned for testlyden.

Hvis der ikke lyder en testlyd gentages proceduren som beskrevet i trin 4.

uTV 2 statuslys giver informationer under testtilstanden.

Farverne veksler for at vise lydindgangens status samt status for forbindelsen til uDirect 2.

### Eksempel:

Rød/blå/rød/blå/osv.: streaming lydtest til uDirect 2, der kan ikke findes noget audio input på uTV 2.

### Farvekoder:

Rød: Ingen lydindgang på uTV 2

Grøn: Lydindgang registreret på uTV 2

Orange: Søger efter uDirect 2

Blå: Streamnings-testlyd til uDirect 2



Hvis ingen uDirect 2 findes, og ingen lydindgang er tilgængelig, vil uTV 2 stoppe test-tilstanden, og indikatoren blinker grønt.

## Fejlfindingsvejledning

### Mest sandsynlig årsag Løsning

Ingen af indikatorerne er skiftet til at lyse konstant blå

Enheder ikke tændt	Tænd alle enheder
--------------------	-------------------

uDirect 2 og uTV 2 er ikke forbundet	Gentag trin 4
--------------------------------------	---------------

Jeg kan se et hurtigt blinkende blå indikatorlys (g) på uTV 2

uTV 2 er i Bluetooth-sammenkoblingstilstand	Gå til trin 4
---	---------------

Kun det ene af de blå indikatorer lyser konstant blå

En af enhederne er forbundet til en anden Bluetooth-enhed	Sørg for at slukke alle andre Bluetooth-enheder med undtagelse af uDirect 2 og uTV 2
---	--

Begge indikatorer lyser blå konstant, men jeg kan ikke høre TV'et

uDirect 2 er uden for høreapparaternes rækkevidde	Bær uDirect 2 rundt om halsen, og fastgør halsslyngen korrekt. Slå alle enheder FRA og TIL igen.
---	--

uDirect 2 er ikke korrekt programmeret til dine høreapparater	Bed din høreapparatspecialist om at omgruppere din uDirect 2 og dine høreapparater
---	--



## Mest sandsynlig årsag Løsning

### Jeg kan ikke høre lyden fra TV'et via uDirect 2

Enheder ikke tændt Tænd alle enheder

Kablerne er ikke sat korrekt i Gentag trin 2

Ingen lydindgang til uTV 2. Indikatoren blinker grønt Sørg for, at lyden på TV'et ikke er slået fra  
Vælg et 75 % lydstyrkeniveau på TV-apparatet  
Sørg for, at audiokablet bruges på en udgangsport "OUT"

uTV 2 er i pausetilstand Indikeres på begge enheder af statusindikatorer, der blinker blå. Et kort tryk på uDirect 2 hovedknappen (A) afbryder pausetilstanden og genoptager funktionen

Afstanden mellem uDirect 2 og uTV 2 er for stor Placér enhederne tættere på hinanden. 30 meter er den maksimale afstand ved frit udsyn.  
For at undgå streamningafbrydelser skal du sørge for at bære uDirect 2 korrekt og holde Bluetooth-enheden inden for brugsrækkevidden

## Mest sandsynlig årsag Løsning

### Lydstyrken under streaming er ikke behagelig (for lav eller for høj)

De forskellige TV-lydkilder har forskellige udgangslydstyrker Hvis uTV 2 er sluttet til RCA/Cinch- eller SCART-stikket på TV'et, skal du justere lydstyrken ved hjælp af uTV 2 volumenknapper  
Hvis uTV 2 er tilsluttet til headsetstikket på TV'et, kan du også justere lydstyrken ved hjælp af TV'ets knap til indstilling af lydstyrke  
Juster lydstyrken på din satellitmodtager eller set-topboks  
Indstil volumen ved brug af uDirect 2 volumen knapperne

### Efter tilslutning af uTV 2, slukkes TV højttaleren

Headset outputforbindelsen på TV'et vælges Vælg et andet audio output på dit TV såsom RCA/Cinch eller Scart

## Vigtige oplysninger

---

Læs omhyggeligt det tilhørende afsnit i Unitron uDirect 2 betjeningsvejledningen, som er leveret sammen med hver uDirect 2.

### Fareadvarsler


- ⚠ Denne enhed skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år.
- ⚠ Interferens med medicinsk udstyr. Disse Unitron enheder bruger digitalt kodet transmission med lav effekt til kommunikation med dine høreapparater. Selvom det ikke er sandsynligt, kan der forekomme interferens med medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere. Derfor må personer der anvender medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere, ikke bruge denne enhed.
- ⚠ Benyt kun høreapparater, der er specielt tilpasset din hørelse af en professionel høreapparatspecialist.
- ⚠ Enhederne må ikke udsættes for ændringer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Unitron.


- ⚠ Eksterne enheder må kun tilsluttes, hvis de er blevet testet i overensstemmelse med tilsvarende IECXXXXX-standarder. Brug kun tilbehør, der er godkendt af Unitron.


### Oplysninger om produktsikkerhed

- 📖 Når uTV 2 ikke er i brug, skal du slukke for uTV 2.
- 📖 Tilslut altid uDirect 2 halsklyngen, og bær den rundt om halsen, når der sendes signaler til dine høreapparater.
- 📖 Beskyt enhedens koblinger, stik, ladestik og strømforsyning mod støv og snavs.
- 📖 Beskyt alle enheder mod store mængder fugt (badning eller svømning) samt varmekilder (radiator, tv-flader). Beskyt enhederne mod kraftige stød og vibrationer.
- 📖 Rengør enhederne med en fugtig klud. Brug aldrig almindelige rengøringsmidler (vaskepulver, sæbe osv.) eller sprit til rengøring af enhederne. Brug aldrig en mikrobølgeovn eller andre

opvarmningsenheder til at tørre enhederne.

 Den digitalt kodede, induktionstransmissions teknologi, der er anvendt i dette apparat, er særdeles driftssikker og påvirkes stort set ikke af interferens fra andre apparater. Det bør dog bemærkes, at, når høreapparatet anvendes i nærheden af computerudstyr, større elektroniske installationer eller andre kraftige elektromagnetiske felter, kan det være nødvendigt at holde en afstand på minimum 60 cm for at sikre, at det fungerer korrekt.

 Røntgenstråler, CT-scanninger og MRI-scanninger kan ødelægge eller negativt påvirke høreapparaternes funktioner.

 Brug ikke disse enheder i områder, hvor elektronisk udstyr er forbudt.

## Information om overensstemmelse

---

### Overensstemmelseserklæring

Unitron erklærer hermed, at dette Unitron-produkt opfylder de grundlæggende krav i direktivet om radioog telekommunikationsterminaludstyr, R&TTE-direktivet 1999/5/EU. Overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan fås hos producenten eller den nærmeste Unitronrepræsentant, hvis adresser kan hentes fra listen på [www.unitron.com](http://www.unitron.com) (Global tilstedeværelse).

#### Note 1:

Enheden overholder kravene i Del 15 i FCCbestemmelserne og RSS-210 i Industry Canada. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

- 1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- 2) denne enhed skal acceptere al modtagen støj, inklusive støj som kan forårsage uønsket drift.

#### Note 2:

Ændringer eller modificeringer af enheden, som Unitron ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan resultere i, at FCC-tilladelsen til brug af udstyret inddrages.

### Note 3:

Enheden er blevet testet og overholder grænserne for en digital klasse B-enhed i henhold til Del 15 i FCCbestemmelserne og ICES-003 i Industry Canada.

Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer.

Enheden genererer, bruger og kan udsende radiofrekvenser, og hvis den ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens ved radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens ved en given installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens ved radioeller TV-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, skal brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

Modtagerantennen skal drejes eller anbringes et andet sted.

Afstanden mellem enheden og modtageren skal øges.

Enheden skal sluttes til et udtag i et andet kredsløb end det kredsløb, som modtageren er sluttet til.

Bed forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjælp.

### Note 4:

#### Erklæring om eksponering for radiobølgestråling i overensstemmelse med FCC/IC

Denne enhed er i overensstemmelse med FCC/IC-eksponeringsgrænserne for stråling i et ukontrolleret miljø. Slut brugere skal følge de særlige betjeningsinstruktioner for at opfylde kravene til overholdelse af RF-eksponering. Denne sender må ikke placeres sammen med eller betjenes i forbindelse med en anden antenne eller sender.

Yderligere oplysninger kan findes i databladet, som kan downloades fra [www.unitron.com/dk](http://www.unitron.com/dk)

**CE** CE-symbolet er Unitron's bekræftelse på, at dette Unitronprodukt opfylder kravene i R&TTedirektivet 0678 1999/5/EU om radio- og

telekommunikationsterminaludstyr. Nummeret efter CE-symbolet er tal fra de konsulterede certificerede organer i henhold til ovennævnte direktiver. Advarselssymbolet betyder, at potentielle restriktioner af brugen gælder i et eller flere EU-medlemslande.

Denne enhed er en klasse-2-enhed og kan bruges i EU-medlemslande uden restriktioner for indendørs brug, men må ikke bruges udendørs i Frankrig.

### Brugsforhold:

Denne enhed er udformet på en sådan måde, at den fungerer problemfrit og uden begrænsninger, hvis den anvendes som tilsigtet, medmindre andet er angivet i denne betjeningsvejledning.

0° til 55° Celsius og relativ luftfugtighed på <95 % (ikke-kondenserende).

### Transport og opbevaringsforhold:

Under transport eller opbevaring bør temperaturen ikke overskride grænseværdierne på -20°/60° Celsius og en relativ luftfugtighed på 90 % i længere tid. Luft tryk mellem 500 og 1.100 hPa er passende.



Symbolet med krydset over skraldespanden betyder, at denne enhed ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Kassér din brugte enhed på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, eller aflever det hos din høreapparatspecialist, der vil sørge for korrekt bortskaffelse. Korrekt bortskaffelse beskytter miljøet og sundheden.



Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker fra Unitrons side sker under licens. Øvrige varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.



Australiske overensstemmelsesmærke for EMC og radiokommunikation





**Unitron Hearing Ltd.**

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,  
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

**European Representative**

Max-Eyth-Straße 20, 70736  
Fellbach-Oeffingen, Germany

CE 0678  

Distributør

[www.unitron.com/dk](http://www.unitron.com/dk)



11-051 029-5894-08

