

Betjeningsvejledning til Unitron uMic™



Tak

Tak, fordi du har valgt Unitron uMic™.

Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister med henblik på at udvikle avancerede, formålsdrevne løsninger til alle.

Because hearing matters.

Din uMic

Høreapparattilpasser: _____

Telefonnummer: _____


Serienummer for uMic: _____

Garanti: _____


Købsdato: _____

Oversigt


Opladning af uMic

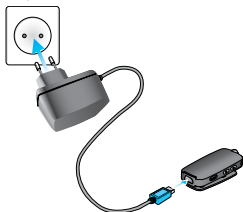


Tænd/sluk

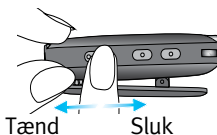

Anvendelse af uMic

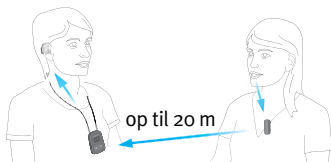

Bluetooth-tilslutning

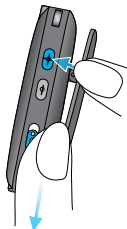

Indikator




Tænde		Grøn i 2 sekunder
Slukke		Rød i 2 sekunder
Opladning		Konstant rød
Advarsel om lavt batteriniveau		Ekstra kort rødt blink udover almindeligt signal
Streaming		Konstant blå
Streaming på pause		Blå blink
Sammenkoblingstilstand		Hurtige blå blink

Indholdsfortegnelse

Din uMic i korte træk.....	2
Kom i gang.....	4
Opladning af uMic	5
Sådan tændes og slukkes uMic	7
Parring af uMic med uDirect 2.....	8
Klargøring af uDirect 2	12
Tilslutning af uMic til uDirect 2.....	13
Funktionstest af uMic.....	14
Indstilling af uMic-lydstyrken.....	15
Sådan bæres uMic korrekt.....	16
Sådan sættes uMic på pause og startes igen.....	17
Sådan slukkes uMic	18
Særlige anvendelser	19
Fejlfindingsvejledning	24
Advarsler	29
Overensstemmelsesoplysninger	33
Oplysninger om og forklaring af symboler.....	35

Din uMic i korte træk

- 1 Lydstyrke op (+)
- 2 Lydstyrke ned (-)
- 3 Tænd/sluk-knap (I/O)
- 4 Opladerstik (mini-USB)
- 5 Mikrofonåbning
- 6 Statusindikatorlys
- 7 Øje til nøglesnor
- 8 Bæreclips

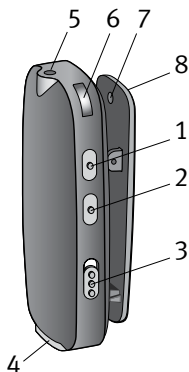


Tilbehør

(Indholdet kan variere afhængigt af land)

Dobbelt mini-USB splitter (1 ind/2 ud)

Nøglesnor

Beskyttelsespose

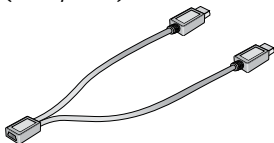

Andet valgfrit udstyr

Unitron-mini-USB-strømforsyning

12 V-adapter til biloplader



Ud over dit trådløse Unitron-høreapparat kræves der en kompatibel streamerløsning. I denne brugervejledning vises uDirect™ 2 som eksempel. Da uMic-transmitteren er baseret på Bluetooth®-teknologi, kan andre Bluetooth-modtagere være compatible. uMic er imidlertid optimeret for Unitron uDirect 2.

Kom i gang

Systemet består af tre hovedelementer:


- uMic
- Unitron-høreapparat
- uDirect 2

uMic sender talerens stemme trådløst til dit høreapparat via uDirect 2-streameren.

Mikrofonlydstyrken i høreapparatet vil automatisk blive justeret, mens uMic-signalet modtages. Justeringsniveauet indstilles af høreapparatspecialisten.

høreapparatbruger

talende

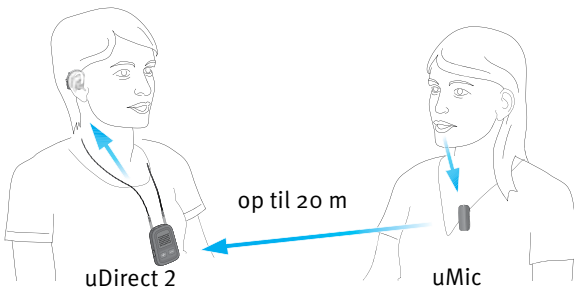


Opladning af uMic

Din uMic har et indbygget, genopladeligt batteri, som ikke kan tages ud. Når batteriniveauet er lavt, blinker indikatorlyset rødt.

Sådan oplader du:

1. Sæt Unitron-strømforsyningen, som følger med uDirect 2, i uMic-mini-USB-stikket.

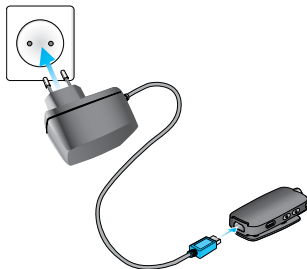

2. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.

Den normale opladningstid er 2 timer.

Opladningen er færdig, når indikatorlyset lyser konstant grønt.

 Når du oplader din uMic for første gang, skal du lade den oplade i mindst tre timer, også selvom batteriindikatoren ikke er tændt eller bliver grøn tidlige.

Brug af én strømforsyning til 2 apparater:

Sæt den dobbelte mini-USB-splitter mellem strømforsyningen og apparaterne som vist nedenfor.


Med uDirect 2:

Begge apparater kan oplades på samme tid.

Med uTV 2:


uMic kan oplades, mens uTV™ 2 anvendes.

 Det er sikkert at lade uMic være koblet til opladeren natten over.

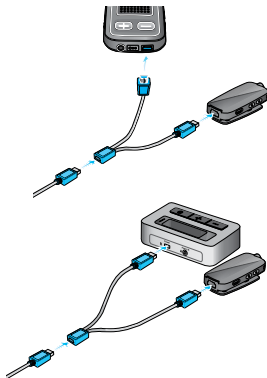

Sådan tændes og slukkes uMic

Skub tænd/sluk-knappen (I/O) som vist for at tænde eller slukke uMic.

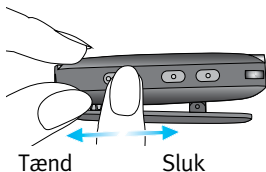

Slumretilstand

Hvis der ikke efter 30 minutter er fundet en streamerenhed, som f.eks. uDirect 2, vil uMic lukke ned for at spare på batteriet, også selvom tænd/sluk-knappen er i positionen tænd.

Du kan afbryde slumretilstand ved at slukke for uMic og tænde for den igen.


Parring af uMic med uDirect 2

Inden du bruger uMic med en streamer for første gang, skal apparaterne parres.

 Hvis du ikke bruger uDirect 2, men en anden streamer, skal du følge proceduren for Bluetooth-tilslutning for det pågældende apparat.

Sæt uDirect 2 i parringstilstand:

1. Tænd for uDirect 2 (.
2. Tryk på tilslutnings- () og lydstyrkeknappen () samtidig, og hold dem inde i 2 sekunder, indtil lysindikatoren begynder at blinke med hurtige blå blink. uDirect 2 vil forblive i sammenkoblingstilstand i to minutter, eller indtil sammenkoblingen er gennemført.

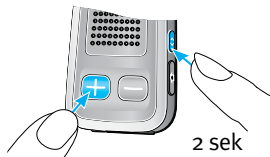


Sæt uMic i parringsstilstand:

 Hvis uMic ikke har været parret før, vil parringstilstanden automatisk blive slået til, når den tændes.

Sådan startes parringstilstand en automatisk:

1. Sluk for uMic.
2. Tryk på lydstyrkeknappen, og hold den inde (+).
3. Tænd for uMic, mens du stadig trykker på knappen (+).
4. Slip knappen (+) efter 2 sekunder, når indikatoren blinker med hurtige blå blink.
5. Sørg for, at uMic og uDirect 2 er højst 1 m fra hinanden.

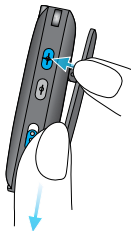

uMic vil forblive i parringstilstand i to minutter, eller indtil sammenkoblingen er gennemført.

Sådan fuldføres parring:

Vent til begge indikatorer lyser konstant blå.
Dette kan tage op til 2 minutter, men varer normalt kun nogle få sekunder.

 uMic kan parres med maksimalt 4 enheder. Hvis man forsøger at parre en femte enhed, vil den erstatte den første parrede enhed.

 To enheder behøver kun at blive parret én gang. De forbliver parrede, efter de er slukket, og vil automatisk blive forbundet, når de tændes igen.

Sådan virker statuslyset

Oplysninger under betjening:

	 uMic	 uDirect 2
Tænde	Grøn i 2 sekunder 	Grøn i 2 sekunder 
Streaming	Konstant blå 	Konstant blå 
Streaming på pause	Blå blink 	Blå blink 
Parringsstilstand	Hurtige blå blink 	Hurtige blå blink 

Oplysninger om strøm og batteri:

Tænde	Grøn i 2 sekunder	
Slukke	Rød 2 sekunder	
Opladning	Konstant rød	
Opladet og fuldt batteri	Konstant grøn	
Advarsel om lavt batteriniveau	Kort rødt blink udover almindeligt signal	
uMic i slumretilstand eller slukket	Indikatoren lyser ikke	

 Sluk uMic, og tænd den igen for at aktivere apparatet efter slumretilstand.

Hvis den røde indikator for "lavt batteriniveau" blinker: 

Batteriniveauet er <20 %


Der er mindre end 1,5 timer tilbage til streaming

Overvej at oplade uMic

 uMic kan også oplades under brug.

Klargøring af uDirect 2

1. Tænd for uDirect 2.
2. Bær altid uDirect 2 om halsen.
3. Sørg for, at begge stik sidder godt fast i kontakterne til halsslyngen.

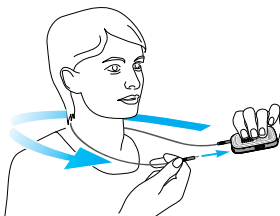

 Du finder en mere detaljeret forklaring af uDirect 2, i brugervejledningen til uDirect 2.

Tilslutning af uMic til uDirect 2

Hver gang apparaterne tændes, vil de automatisk oprette forbindelse til hinanden.

1. Sørg for, at uMic og uDirect 2 højst er 2 meter fra hinanden.
2. Tænd for uMic.
3. Indikatorlyset vil først blive grønt.
4. Vent, til indikatorlysene på begge apparater lyser konstant blå.
Dette kan tage op til 30 sekunder, men sker normalt inden for 5 sekunder.




uDirect 2 vil bekræfte forbindelse med talte meddelelser eller bip i dit høreapparat, afhængigt af konfigurationen af uDirect 2.

 Hvis statuslyset blinker med hurtige blå blink, når uMic er tændt, eller hvis statuslyset ikke lyser konstant blå inden for to minutter, skal du gentage parringen.

Funktionstest af uMic

Inden systemet tages i brug, skal der gennemføres en hurtig funktionstest ved, at man banker forsigtigt på mikrofonåbningen.

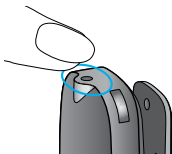


Du skal tydeligt kunne høre bankelyden i dit høreapparat.

 Frit udsyn mellem uMic og streameren er normalt ikke nødvendigt. Hvis lydtransmissionen afsluttes pludseligt, henvises der til fejlfindingsvejledningen.

Indstilling af uMic-lydstyrken

Sådan ændres uMic-lydstyrken:

1. Tal ind i uMic fra en afstand på 20 cm.
2. Brug lydstyrkeknapperne (+/-) til at indstille uMic-lydstyrken til et behageligt niveau.

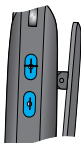

Hvis høreapparatet samler for meget af den omgivende støj op, skal du bruge følgende 2 trin til at give uMic mere fokus:

1. Sænk høreapparatets lydstyrke ved at trykke på knappen uDirect 2 (-).
2. Øg derefter uMic-lydstyrken ved at trykke på uMic-knappen (+).




 Indstillingen for uMic-lydstyrken vil blive gemt, også efter apparatet er slukket.



 Høreapparatspecialisten kan ændre niveauet for høreapparatets mikrofoner ved at bruge uMic til at justere lydstyrken for lyde omkring dig.

Sådan bæres uMic korrekt


1. Tryk forsigtigt for at åbne klemmen.
2. Sørg for, at uMic er sat godt fast med klemmen på tøjet som vist på billedet.
3. For at forhindre støj må uMic ikke dækkes med tøj under brug.

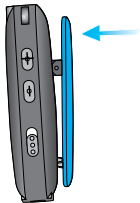

Afstand til den talendes mund:

Det bedste resultat opnås med en afstand på 20 cm.

Undgå en afstand på mere end 50 cm for at få en jævn lyd.

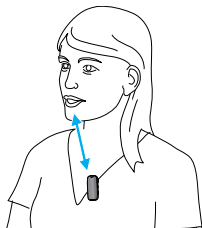

 Jo højere den omgivende støj er, jo tættere skal uMic være placeret på den talendes mund.

 Undlad at bruge en nøglesnor til at have om halsen under streaming. Krattende støj kan påvirke lyden negativt.

Sådan sættes uMic på pause og startes igen

Du kan sætte lydtransmissionen fra din uMic på pause ved at trykke på uDirect 2-adgangsknappen (A).



Under pause:

Streamingindikatorerne vil blinke blå på begge apparater.


Høreapparatet vil skifte tilbage til det seneste høreapparatprogram.

Høreapparatprogrammerne kan ikke ændres via uDirect 2-adgangsknappen under streaming eller pause.

Du kan sætte lydtransmissionen fra din uMic på pause ved at trykke på uDirect 2-adgangsknappen (A).

Sådan slukkes uMic

Du kan afslutte uMic-transmissionen helt ved at slukke for uMic ved at skyde tænd/sluk-knappen til positionen Sluk.

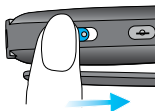

 I positionen Sluk kan det hvide mærke ikke ses. Sluk for uMic, når den ikke er i brug.

 Hvis uMic-forbindelsen til en streamer har været mistet i mere end 30 minutter, vil uMic gå i slumretilstand for at spare på strømmen. Lysindikatoren vil blive slukket, og uMic skal genstartes (sluk og tænd igen) for at genoptage transmissionen.

Særlige anvendelser

uMic og telefonopkald

Telefonopkald via Bluetooth vil altid have højere prioritet end uMic-streaming.

Hvis uDirect 2 er parret med din mobiltelefon, kan du stadig modtage telefonopkald, selv når du bruger uMic. Hvis du modtager et indgående opkald, stopper uDirect 2 automatisk transmissionen af lydsignalet fra uMic og sender signalet fra din mobiltelefon til dit høreapparat i stedet.



Du kan tage imod et indgående opkald ved at trykke kortvarigt på uDirect 2-adgangsknappen (A), når du hører ringetonen i dit høreapparat. Tryk på adgangsknappen igen for at afslutte telefonopkaldet.

Brug af uMic, når du ser tv

For at sikre lyd af høj kvalitet fra tv'et anbefaler vi, at du bruger uTV 2.


I tilfælde hvor et analogt tv-lydoutput ikke er til rådighed, eller når du er på rejse, kan uMic bruges til at forbedre lydkvaliteten, når du ser tv.

Sådan opnår du det bedste resultat:

1. Prøv at finde tv-højttaleren.
2. Anbring uMic 20 cm fra højttaleren.
3. Overvej at lade opladeren være tilsluttet, mens du ser tv.



uTV 2

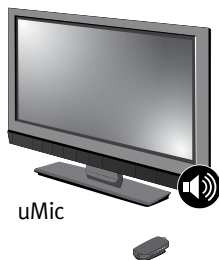

uMic

uMic-streamingafstand

uMic-transmitteren understøtter brug i en afstand på op til 20 m. Der behøver ikke at være frit udsyn mellem uDirect 2 og uMic. Interferens i omgivelserne på grund af fx vægge og møbler kan reducere rækkevidden.

Hvis uMic flyttes ud af uDirects rækkevidde, afbrydes den trådløse transmission, enten midlertidigt eller permanent. Hvis uMic herefter flyttes tilbage til indenfor uDirects rækkevidde, vil den automatisk genoptage streamingen til dit høreapparat.

Det kan tage op til 10 sekunder, før streamingen genoptages.



Hvis streamingen har været afbrudt i mere end 30 minutter, kan det være nødvendigt at slukke for uMic og tænde den igen.

Understøttelse af flere uMics

Det er ikke muligt at streame lyd fra to uMics til én uDirect 2 på samme tid.

To uMics kan imidlertid parres med uDirect 2, og der kan derefter opnås adgang til dem skiftevis ved, at man trykker på uDirect 2-adgangsknappen. For hvert tryk vælger uDirect 2 den næste uMic i en fastlagt rækkefølge.

 Hvis der allerede er tilsluttet mobiltelefon til uDirect 2, er der kun tilsluttet én uMic.

Brug af nøglesnoren


Til transport kan du bruge den aftagelige nøglesnor som vist her.



Sletning af alle Bluetooth-parringer

Hvis du oplever problemer med en af de parrede enheder, eller hvis en enhed holder op med at oprette forbindelse til din uMic, kan du overveje at slette alle parringer fra uMic.

1. Tænd for uMic ved at trykke på knappen (+) og holde den inde i 10 sekunder. Dette sletter alle sammenkoblinger.
2. Slip knappen (+), når det blå indikatorlys bliver grønt.

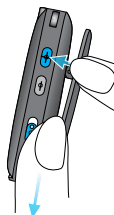

Sletning af parringer af Bluetooth-enheder fjerner muligheden for at oprette forbindelse til tidligere parrede Bluetooth-enheder. Du skal foretage parringsprocessen igen (se side 8), hvis du vil genoprette forbindelse.

 Statuslyset vil blinke hurtigt med blått lys i nogle få sekunder, når tilslutningerne er slettet (automatisk parringstilstand).

Fejlfindingsvejledning

Mest sandsynlige årsag Løsning

Jeg kan ikke høre lyd fra uMic

Et af eller alle apparaterne er slukket

Sørg for, at alle apparater (uMic, streamer, høreapparat) er tændt og fungerer

uMic er i pausetilstand (statusindikatoren blinker blå)

Tryk kortvarigt på uDirect 2-adgangsknappen for at genoptage streaming

Afstanden mellem uDirect 2 og uMic er for stor

Flyt apparaterne tættere på hinanden. 20 meter er maksimumafstanden. For at undgå afbrydelser i streamingen skal du sørge for at bære uDirect 2 korrekt og holde uMic inden for dens rækkevidde

En forhindring bremser transmission

Afhængigt af materialet kan frit udsyn være nødvendig

Mest sandsynlige årsag Løsning

Jeg hører afbrydelser i lydtransmissionen

uMic er for langt fra uDirect 2 eller dækket af en genstand

Undlad at overskride maksimumafstanden, og flyt apparatet

uDirect 2 søger efter andre sammenkoblede enheder i 2 minutter, efter den er blevet tændt. Dette kan få lydsignalet til at falde ud

Efter 2 minutter vil uDirect 2 stoppe med at søge efter andre enheder, og afbrydelsen vil ophøre

Lydstyrken under streaming er ikke passende (for lav eller for høj)

Lydstyrkeniveauerne er ikke indstillet korrekt

Juster lydstyrken med uDirect 2-lydstyrkeknapperne (+/-). Lydstyrken kan også justeres med uMic-knapperne (+/-)

Mest sandsynlige årsag Løsning

Der er for meget støj, og jeg kan ikke forstå den, der taler

Mikrofonerne i dit høreapparat er indstillet for højt

Reducer lydstyrken i høreapparatet ved at trykke på uDirect 2 (–) -tasten, indtil du når et behageligt niveau.

Anbring uMic tættere på den talendes mund (20 cm).

Brug uMic (+) -knappen til at øge uMic-lydstyrken

uMic gnider sig op ad brugerens tøj

Sørg for, at uMic er sat godt fast med klemmen. uMic må ikke være dækket af tøj

Indstillingerne for dit høreapparat er forkerte

Bed høreapparatspecialisten om at finindstille høreapparatet

Mest sandsynlige årsag Løsning

uMic genkendes ikke længere af uDirect 2, som den tidligere har været parret sammen med

2 minutter efter at der ikke blev fundet en enhed, stopper uDirect 2 med at søge efter enheder for at spare på strømmen

Sluk for uDirect 2. Vent, til den røde strømindikator slukkes, og tænd derefter apparatet igen

Apparaterne er for langt fra hinanden

Sæt apparaterne med en afstand på 1 meter fra hinanden, og prøv igen

uMic kan maksimalt parres med 4 forskellige Bluetooth-enheder (uDirect 2 kan parres med 8). Hvis den interne hukommelse er fuld, vil den femte parring slette den første parring

Gentag parringen mellem enhederne

Parring er aldrig foretaget, eller den er slettet manuelt

Gentag parringen mellem enhederne

Lysindikatoren lyser ikke konstant blå

uMic og uDirect 2 er ikke parret

Gentag parringen mellem enhederne

Mest sandsynlige årsag Løsning

Jeg ser et hurtigt blinkende blå indikatorlys på uMic

uMic er i parringstilstand	Fuldfør parringen
----------------------------	-------------------

Indikatorlyset lyser konstant blå, men jeg kan ikke høre uMic

uDirect 2 er uden for høreapparatets område	Bær uDirect 2 rundt om halsen, og sæt halsslyngen rigtigt fast
---	--

uDirect 2 er ikke programmeret korrekt til dit høreapparat	Bed høreapparatspecialisten om at konfigurere din uDirect 2 og høreapparatet
--	--

Opladningstiden er længere end normalt

Apparatet bruges under opladning	Det er muligt at oplade under brug, men opladningstiden øges med 30 % (>2 timer)
----------------------------------	--

Opladeren giver ikke nok strøm	Brug kun opladere, som er godkendt af Unitron
--------------------------------	---

Kontakt høreapparatspecialisten, hvis du har problemer, som ikke er anført i denne brugervejledning.

Advarsler



Læs omhyggeligt det tilhørende afsnit i brugervejledningen til Unitron uDirect 2, som følger med hver enkelt uDirect 2.

Advarsler om fare



Hold dette apparat væk fra børn under 3 år.



Påvirkning af medicinsk udstyr. Disse Unitron-apparater anvender en digitalt kodet lavstrømstransmission til at kommunikere til dit høreapparat. Selvom det er usandsynligt, kan der opstå interferens med medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere. Derfor må personer, der bruger medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere, ikke bruge dette apparat.



Brug kun høreapparater, som er specielt programmeret til dig af høreapparatspecialister.



Af sikkerhedsgrunde må du kun oplade med opladere, som er leveret af Unitron, eller stabiliserede opladere 5 V jævnstrøm, min. 250 mA.

Vigtige oplysninger

- ⚠ Undlad at oplade uMic fra en USB-port på en pc eller en bærbar computer. Dette kan beskadige dit udstyr.
- ⚠ Det er ikke tilladt at foretage ændringer eller tilpasninger af enhederne, som ikke er godkendt af Unitron.
- ⚠ Eksterne enheder må kun tilsluttes, hvis de er blevet testet i henhold til de tilsvarende IECXXXXX-standarder. Brug kun tilbehør, som er godkendt af Unitron.
- ⚠ Batteriet må kun udskiftes af autoriseret personale. Forsøg ikke at åbne produktet eller tage batteriet ud, da det kan medføre personskaade eller beskadigelse af produktet.
- ⚠ Bortskaf elektriske komponenter i henhold til lokale bestemmelser.
- ⚠ Mini-USB-porten er kun beregnet til brug til det beskrevne formål.

Oplysninger om produktsikkerhed

-  Sluk for uMic, når den ikke er i brug.
-  Tilslut altid uDirect 2 til halsslyngen, og bær den rundt om halsen, når der sendes signaler til dit høreapparat.
-  Beskyt apparatets stikforbindelser, stik, opladeråbning og strømforsyning mod snavs.
-  Beskyt alle apparater mod store mængder fugt (bade- eller svømmeområder) og varmekilder (radiator, tv-top). Beskyt apparaterne mod ekstreme stød og vibration.
-  Rengør apparaterne med en fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmidler til husholdningsbrug (vaskepulver, sæbe osv.) eller alkohol til at rengøre dem med. Apparatene må ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre opvarmningsapparater.
-  Den digitalt kodede induktive transmissionsteknologi, der anvendes i disse apparater, er meget pålidelig og modtager næsten ingen interferens fra andre enheder. Det skal imidlertid bemærkes, at systemet anvendes i nærheden af computerudstyr, en større

elektronisk installation eller stærke magnetfelter, kan det være nødvendigt at være mindst 60 cm væk fra den interfererende enhed for at sikre korrekt funktion.



Røntgenstråling, CT- og MRI-scanninger kan ødelægge eller påvirke apparaternes funktion negativt.



Disse apparater må ikke bruges i områder, hvor elektronisk udstyr er forbudt.

Andre vigtige oplysninger



uMic er en Bluetooth 2.1-kompatibel enhed. Dens trådløse transmissionsteknologi er ikke begrænset til, men optimeret for Unitron-streamerenheder, som f.eks. uDirect 2.



Anvendelsen af uMic med streamere, som ikke kommer fra Unitron, understøttes ikke af Unitron.

Overensstemmelsesoplysninger

Overensstemmelseserklæring

Unitron erklærer herved, at dette Unitron-produkt overholder de væsentlige krav i Retningslinjerne for radio- og teleterminaludstyr 1999/5/EC. Den fuldstændige tekst til overensstemmelseserklæringen kan fås fra producenten eller den lokale Unitron-repræsentant, som du kan finde adressen på på www.unitron.com (verdensomspændende liste).

Bemærkning 1:

Denne enhed overholder del 15 i FCC reglerne og RSS-210 reglerne i Industry Canada. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- 1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- 2) denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktioner.

Bemærkning 2:

Ændringer eller modifikation af denne enhed, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Unitron, kan ophæve FCC-godkendelsen til betjening af denne enhed.

Bemærkning 3:

Denne enhed er testet, og den overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler (Federal Communications Commission) og ICES-003-kravene (Interference-Causing Equipment Standard), fremsat af Industry Canada. Disse begrænsninger er udarbejdet

for at give en form for beskyttelse mod skadelig interferens i installationer til privat brug. Denne enhed genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og anvendes i henhold til vejledningen, kan den forårsage skadelig interferens til radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der opstår interferens i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at prøve at korrigere interferensen med en eller flere af følgende metoder:

Drej eller omplacer modtagerantennen.

Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Slut enheden til en stikkontakt, der er forbundet med et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Bemærkning 4:

FCC/IC-erklæring og eksponering for RF-stråling Dette udstyr overholder FCC/IC-grænserne for eksponering for stråling, som er angivet for et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsinstruktioner for at overholde RF-eksponeringskravene. Denne transmitter må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med en anden antenne eller transmitter.

Australien: Leverandørkodenummer  N15398

New Zealand: Leverandørkodenummer Z1285

Oplysninger om og forklaring af symboler



CE-symbolet er en bekræftelse fra Unitron af, at dette Unitron-produkt overholder kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EC vedrørende radio- og teleterminaludstyr. Tallene efter CE-symbolet er antallet af konsulterede certificerede organer i henhold til ovennævnte direktiver.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren læser og tager hensyn til de relevante oplysninger i denne brugervejledning.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugere er opmærksomme på de relevante advarsler i denne brugervejledning.



Vigtige oplysninger om håndtering og produktsikkerhed.



Overensstemmelsesmærkat for Australian EMC and Radiocommunications.

Driftsbetingelser:

Denne enhed er konstrueret på en måde, så den fungerer uden problemer eller begrænsninger, hvis den bruges efter hensigten, medmindre andet er bemærket i disse vejledninger.

0° til 55 °C og en relativ luftfugtighed på <95 % (ikke-kondenserende).

Transport- og opbevaringsbetingelser:

Temperatur: -20° til +60 °C. Fugtighed ved transport: Op til 90 % (ikke-kondenserende). Fugtighed ved opbevaring: 0 % til 70 %, hvis apparatet ikke er i brug. Atmosfærisk tryk: 200 hPa til 1500 hPa.



Symbolet med den overstregede affaldscontainer skal gøre opmærksom på, at denne enhed ikke må smides væk som normalt husholdningsaffald. Bortskaf gamle eller ubrugte enheder på genbrugspladser til elektronisk affald, eller lad sundhedspersonalet med høreelse som område bortskaffe enheden. Korrekt bortskaffelse beskytter miljøet og helbredet.

Dette produkt har et indbygget batteri, som ikke kan udskiftes. Forsøg ikke at åbne produktet eller tage batteriet ud, da det kan medføre personskaade og beskadige produktet.

Kontakt den lokale genbrugsstation med henblik på fjernelse af batteriet.



Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Unitron sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Unitron Hearing Ltd.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Unitron Danmark

Østre Hougvej 42-44
5500 Middelfart

Du kan finde en liste over
virksomheder i Unitron-gruppen på
www.unitron.com

CE
0678



Forhandler

www.unitron.com/dk



12-021 029-5905-08

